

DESARROLLADO Y
FABRICADO EN


USA

TEST DE DROGAS EN SALIVA

BIENVENIDO, has adquirido un test seguro de detección de drogas, que se utiliza con la saliva. Vas a obtener resultados entre 5 a 7 minutos y podrás ver el consumo de 7 drogas distintas en UN SOLO TEST.




Extraiga el dispositivo del sachet.
Luego quite la tapa para poder
usar la lengüeta absorbente.

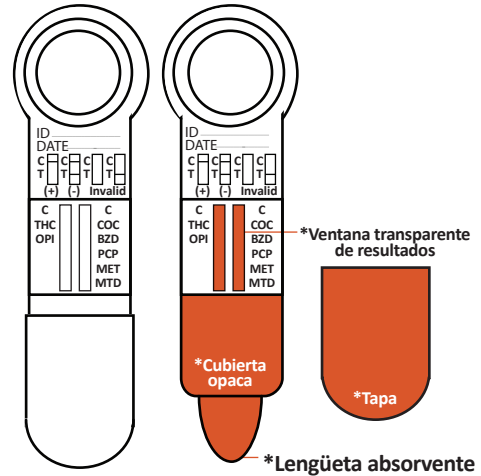


PASOS A SEGUIR

1

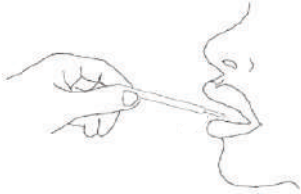

Tome el dispositivo e inserte la ***Lengüeta absorbente** en la boca debajo de la lengua y manténgalo allí por un minuto con la boca cerrada.

2

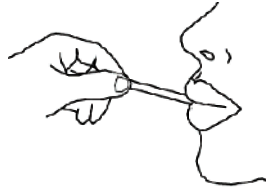

Pida al examinado que cubra de forma constante la ***Lengüeta absorbente** empapada con saliva. No morder ni masticar ni tirar la lengüeta absorbente.

1 MIN


3



Color rosado en las tiras reactivas

Después de 1 minuto bajo la lengua, retire el dispositivo de la boca del examinado. Si el color rosado no ha llegado a la marca de control (C), reinsértelo en la boca durante 30 segundos más. Repita si es necesario.

4

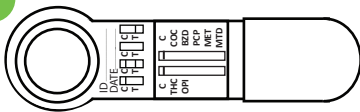

Coloque la tapa sobre la ***Lengüeta absorbente**. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y espere para ver los resultados.

5

Lea los resultados en 5-7 minutos después de que aparezca la línea (C) en cada tira. No compare intensidad de una línea con la otra.



Negativo

Líneas coloreadas en cualquier intensidad aparecen junto a las drogas respectivas.



Positivo

Cuando NO aparezca una línea de color junto a la droga, significa que es POSITIVO.

*** Cuando NO aparece la línea en la C, significa que está inválido.**

5-7 MIN

* OTRAS FORMAS DE USO

GOTARIO

El gotario que viene incluido, meterlo dentro de la boca y llenarlo de la saliva del paciente, luego depositar la saliva en la ***Lengüeta absorbente** del test.

VASO

También se puede sacar la muestra de saliva de algún vaso o recipiente donde se haya colado la saliva.

DROGAS
DETECTADAS

THC (Marihuana) / COC (Cocaína) / XTC (Éxtasis) / BZD (Benzodiazepina)
OPI (Opiazos) / MET (Metanfetamina) / AMP (Anfetaminas)

CERTIFICADO POR
US FDA Y CE

CONTACTO

Cualquier duda sobre su operación
o resultado, llamar a +562 2 6971707

TECNO DATA
Tecnologías Aplicadas

www.tecnodata.cl
tecnodata@tecnodata.cl